

Patienteninformationen anlegen

1

Loggen Sie sich mit Ihrem Benutzernamen und Kennwort ein

2

Um einen Patienten anzulegen, klicken Sie unten rechts auf **+ NEU**

3

Geben Sie alle Patienteninformationen ein

 Frau,  Herr), name (Vorname, Nachname), date of birth (geb. am), address (Untersuchender Arzt: PD Dr. med. Steffen Mühldorfer), lab (Labor: - Bitte ein Labor wählen -), insurance (Kassen-Nr., Versicherer-Nr.), and status (W. gültig bis, Status). There are also radio buttons for 'Stationär', 'Privat', and 'Allg. Kasse', and 'Ambulant', 'Privat', and 'Ü-Schein liegt bei'. A 'Krankenkaese bzw. Roboterträger' field is also present. Buttons for 'ABRECHNEN' and 'WEITER' are at the bottom right."/>

4

Speicherung der Eingaben, indem Sie auf **„Weiter“** und anschließend auf **„Speichern“** klicken

Sobald alle Informationen zur Probe dokumentiert sind, können Sie abschließend den Untersuchungsauftrag versenden

14

Der bearbeitete Auftrag ist unter  Versandfertig 15 hinterlegt. Klicken Sie **„Ansehen“**, um den Untersuchungsauftrag zu prüfen

15

Versenden Sie die Proben wie gewohnt und klicken Sie auf **„Senden“**. Die Pathologie wird nun über den Versand der Proben informiert

Informationen zur Probe dokumentieren


5

Füllen Sie die Probe in den Probenbehälter und kleben Sie ein Code-Label auf den Probenbehälter.

**Achtung:** Füllen Sie pro Probenbehälter nur Gewebeprobe vom selben Organ ein (maximal 6 Proben pro Probenbehälter) und kleben Sie auf jeden Probenbehälter ein eigenes Code-Label. Bitte keine weiteren Markierungen vornehmen!

6

Klicken Sie auf **+ BEHÄLTER HINZUFÜGEN**, um den Probenbehälter anzulegen

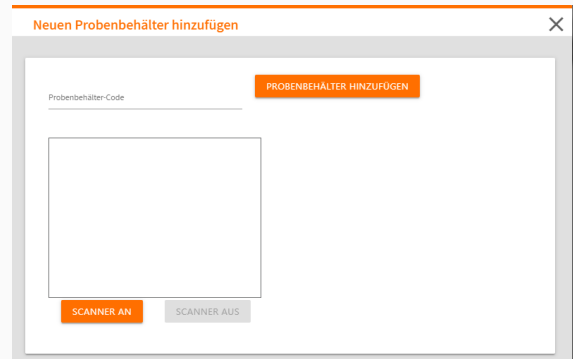

7

Klicken Sie ins Feld Probenbehälter-Code und geben Sie den Code ein:


- a) Scannen Sie mit dem Handscanner das Label **oder**
- b) Manuelle Eingabe des Probenbehälter-Codes

8

Klicken Sie auf **PROBENBEHÄLTER HINZUFÜGEN**

9

Dokumentieren Sie Probeninformationen

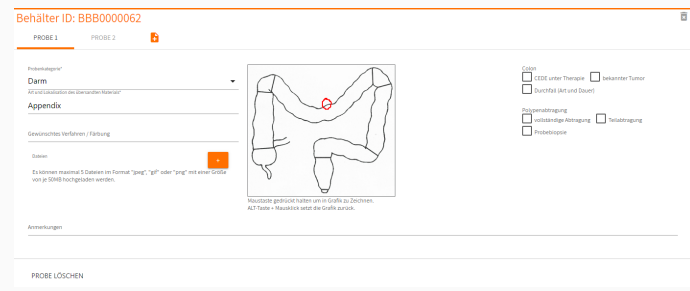

10

Um eine weitere entnommene Probe vom selben Organ - die sich im gleichen Probenbehälter befindet - hinzuzufügen, klicken Sie auf das Plus-Symbol neben „**Probe 1**“

Behälter ID: BBB4000003

PROBE 1 **+**

11

Um einen weiteren Probenbehälter anzulegen, klicken Sie auf **+ BEHÄLTER HINZUFÜGEN**

**Achtung:** Jede Probe, die von unterschiedlichen Organen entnommen wurde, in einen gesonderten Probenbehälter füllen und mit einem neuen Code-Label bekleben und scannen!

12

Optional: Dringlichkeit des Auftrages oben rechts kennzeichnen **Eilig**

13

Klicken Sie auf **SPEICHERN & VERSANDFERTIG**, um den Untersuchungsauftrag abzuschließen und als „**Versandfertig**“ zu markieren